



Precision Xceed™ – insuliinipotilaan verensokerimittari

- mittauksen kesto vain 3 sekuntia
- tarvittava näytemäärä vain 0,3 mikrolitraa verensokerin mittauksessa
- suuri, selkeä ja valaistu näyttö
- 450 tuloksen muisti
- 7, 14 ja 30 päivän keskiarvo
- helppokäyttöinen purkuohjelma

ADC 029/02/2009

Abbott Oy
Diabetes Care
Pihatörmä 1 B
02240 Espoo

 **Abbott**
Diabetes Care

Friends for Life – elinikäinen takuu.

Liity mukaan Friends for Life
-takuuohjelmaan!

Rekisteröi Abbott-verensokerimittarisi

- täyttämällä ja palauttamalla mittarin mukana tuleva takuukortti
- tai internetissä: www.abbottdiabetescare.fi

Rekisteröinnillä saat

- kaikille Abbott-verensokerimittareille ja paristoille elinikäisen takuun
- viallisten tilalle uudet mittarit ja pistolaitteet veloitusetta
- uudet paristot mittariisi ilmaiseksi

Lisätietoja maksuttomasta palvelunumerosta:

0800 555 500

Katso lisätietoja ja opetusvideo mittarin käytöstä
osoitteessa www.abbottdiabetescare.fi



Ystävä arjessa – pelastaja hädässä



 **Abbott**
Diabetes Care

Varmuuden vuoksi

Kuljetat päivittäin mukanasasi verensokerimittaria, mutta missä säilytät ketoainemittariasi? Alkava ketoosi voi uhata esimerkiksi matkalla sairastuessasi tai kun insuliinipistos unohtuu. Sekavan olon alkaessa ketoainemittari yöpöydän laatikossa ei auta silloin kun et itse ole kotona.

Kun Precision Xceed™ on sinulla käytössä päivittäin verensokerimittarina, kulkee ketoainemittarisikin aina mukana, varmuuden vuoksi. Ketoainemittaus tapahtuu yhtä helposti kuin verensokerinkin mittaaminen, vain liuskaa vaihtamalla ja hieman suuremmalla verimäärällä. Näin tiedät hädässäkin miten toimia.



Oikea näytteenottotekniikka

- ota mittaustarvikkeet esille
- pese ja kuivaa kädet hyvin
- pistä sormenpään jompaan kumpaan sivuun (ei keskelle)
- pyyhi ensimmäinen tippa pois
- pumpppaa tarvittaessa kevyesti sormen tyvestä, Ei pistoskohdan vierestä
- ota näyte
- hävitä lansetti asianmukaisella tavalla



Tuplaturvaa insuliinidiabeetikolle: verensokerin ja ketoaineiden mittaus yhdellä mittarilla.



Precision Xceed™ on
ainoa oikea mittari sinulle, mikäli olet:

- insuliinidiabeetikko
- insuliinipumpun käyttäjä
- huonossa hoitotasapainossa
- lapsidiabeetikko

Precision Xceed™ on markkinoiden ainoa verensokerimittari,
jolla voit tarvittaessa mitata myös veren ketoaineet.

Mikäli verensokeriarvosasi ylittää 16,7 mmol/l, mittari kehottaa sinua mittaamaan ketoaineet ("KETONES?"). Toista mittaus ketoliuskalla. Tällöin tarvitset hieman enemmän verta, 1,5 mikrolitraa. Voit tarvittaessa lisätä verta ketoliuskaan mikäli mittaus ei heti käynnisty. Jos ketoainearvo on yli 0,6 mmol/L, sinulla saattaa olla alkava ketoosi.

Keskustele etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa ketoaineista ja mahdollisista toimenpiteistä.

Kun käytät Abbott Diabetes Caren mittareita ja liuskoja verensokerin mittaukseen, näytemääräksi riittää 0,3 mikrolitraa verta. Ketoaineiden mittaukseen riittää 1,5 mikrolitraa verta.



[Voit lukea lisää aiheesta osoitteessa www.abbottdiabetescare.fi](http://www.abbottdiabetescare.fi)