



Precision Xceed™ – blodsockermätare för insulinpatienter

- mätningstiden endast 3 sekunder
- vid blodsockermätning behövs endast 0,3 mikroliters blodmängd
- en stor, tydlig och bakgrundsbelyst display
- ett minne med rum för 450 mättningsresultat
- 7, 14 och 30 dagars medelvärde
- Co-Pilot dataprogram – lätt att använda

Friends for Life – livstidsgaranti.

Bli medlem i vårt
Friends for Life-garantiprogram!

Registrera din Abbott-blodsockermätare

- genom att fylla i och returnera garantikortet som följer med mätaren
- eller via internet: www.abbottdiabetescare.fi

Registreringen berättigar till

- livstidsgaranti för alla Abbott-blodsockermätare samt för batterierna
- felaktiga mätare och lancettpennor ersätts gratis
- gratis nya batterier till din mätare

Ytterligare information från vårt gratis
servicenummer

0800 555 500

Besök vår hemsida för ytterligare information och
se vår virtualvideo över hur mätaren fungerar,
på adressen: www.abbottdiabetescare.fi

ADC 03/04/2009

Abbott Ab
Diabetes Care
Gårdsbrinken 1 B
02240 Esbo

 **Abbott**
Diabetes Care



En vän i vardagen –
en räddare i nöden



 **Abbott**
Diabetes Care

För säkerhets skull

Du bär med dig din blodsockermätare varje dag, men var förvarar du din ketonmätare? En begynnande ketos kan vara överhängande t.ex. vid insjuknande under en resa, insulinpumpen inte fungerar eller om du glömt att ta din insulin. Det hjälper inte att ha en ketonmätare i skrivbordslådan, om du börjar känna dig förvirrad och inte är hemma.

Då du använder Precision Xceed dagligen som blodsockermätare, har du alltid din ketonmätare med dig - för säkerhets skull. Ketonmätningen är lika enkel att utföra som blodsockermätningen, du behöver bara en annan sticka och en aning mera blod på stickan – och mätningen kan du redan, även om du mår dåligt!



Rätt provtagningsteknik

- ta fram allt du behöver för mätningen
- tvätta och torka händerna väl
- stick i sidan av fingerspetsen, EJ i mitten
- torka bort den första bloddroppen
- tryck vid behov lätt vid den yttersta fingerleden, EJ vid stickstället
- ta blodprovet
- gör dig av med lansetten och mätsticken på ett tillbörligt sätt

Dubbel trygghet för insulindiabetiker: blodsocker- och ketonmätning med en och samma mätare.



Precision Xceed™ är
den enda rätta mätaren för dig, om du:

- är insulindiabetiker
- använder insulinpump
- har dålig vårdbalans
- är barndiabetiker

Precision Xceed™ är den enda blodsockermätaren på marknaden, med vilken du vid behov också kan mäta ketoner ur blodet.

Om ditt blodsockervärde är över 16,7 mmol/l uppmanar mätaren dig att mäta ketonerna ("KETONES?"). Gör en ny mätning med en ketonsticka. Härvid behöver du en aning större bloddroppe, 1,5 mikroliter. Du kan vid behov lägga till blod om mätningen inte startar genast. Om ketonvärdet är över 0,6 mmol/l, kan det vara fråga om en begynnande ketos.

Diskutera på förhand med vårdpersonalen om ketoner och om möjliga åtgärder.

Då du använder Abbott Diabetes Care mätare och stickor för blodsockermätning, behövs endast 0,3 mikroliter blod.

Vid ketonmätning räcker 1,5 mikroliter blod.



Du kan läsa mera om detta på adressen: www.abbottdiabetescare.fi